

HAIDIG®

Kindergartenbedarf – Therapiebedarf – Befestigungslösungen



Mit dem von uns entwickelten, multifunktionalen und hochgradig belastbaren Aufhängesystem, haben Sie die Möglichkeit in Ihrem Bewegungs- oder Therapieraum alle gewünschten Aufhängesituationen variabel zu gestalten. Auf Wunsch wird unser T-Schienensystem Ihren räumlichen Gegebenheiten und baulichen Bedingungen maßgenau angepasst und installiert.

Das HAIDIG®-T-Schienensystem ist gleichermaßen für die Decken- und Wandmontage geeignet. Somit erhalten Sie horizontale und vertikale Einstellmöglichkeiten, welche Ihnen völlig neue Schaukelsituationen und Therapievarianten ermöglichen. Ob 1-Punkt-, 2-Punkt- oder Mehrpunktaufhängungen – Ihren Wünschen sind keine Grenzen gesetzt.

T-Schienensystem

zur Decken- und Wandmontage

Damit's sicher ist!

HAIDIG GmbH & Co. KG

🏠 Gernotstr. 17 – 44317 Dortmund

☎ +49 (0)231 91 28 156

📠 +49 (0)231 91 28 157



@ info@haidig.de

🌐 www.haidig.de

🛒 www.kindergartenbedarf-haidig.de


Schäkel geschlossen:
Schlitten arretiert

Schäkel offen:
Schlitten kann über die
Schiene geschoben werden

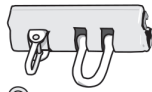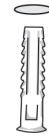


Fernauslösestab

Die Schiene muss durch alle Löcher mit den korrekten Dübeln (Wandbeschaffenheit beachten) und mit 6 mm Senkkopfschrauben (80 – 100 mm) flächenbündig an der Decke montiert werden.

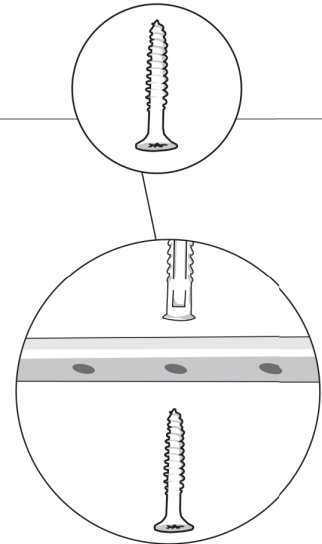


Sicherheitshinweis:

Achten Sie bitte auf eine fachgerechte Montage und verwenden hierfür nur Originalteile des Herstellers! Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mechanischen Teile auf ihre Festigkeit.

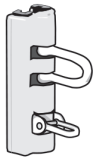

Ob abgehängte Decken oder Leichtbauweise, unser T-Schienensystem passt sich Ihren Wünschen an.

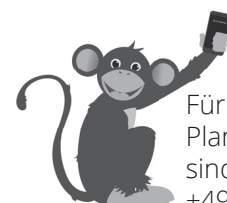

Für eine individuelle Planung und Beratung sind wir für Sie da –
+49 (0)231 91 28 156