


HAIDIG®

Kindergartenbedarf – Therapiebedarf – Befestigungslösungen

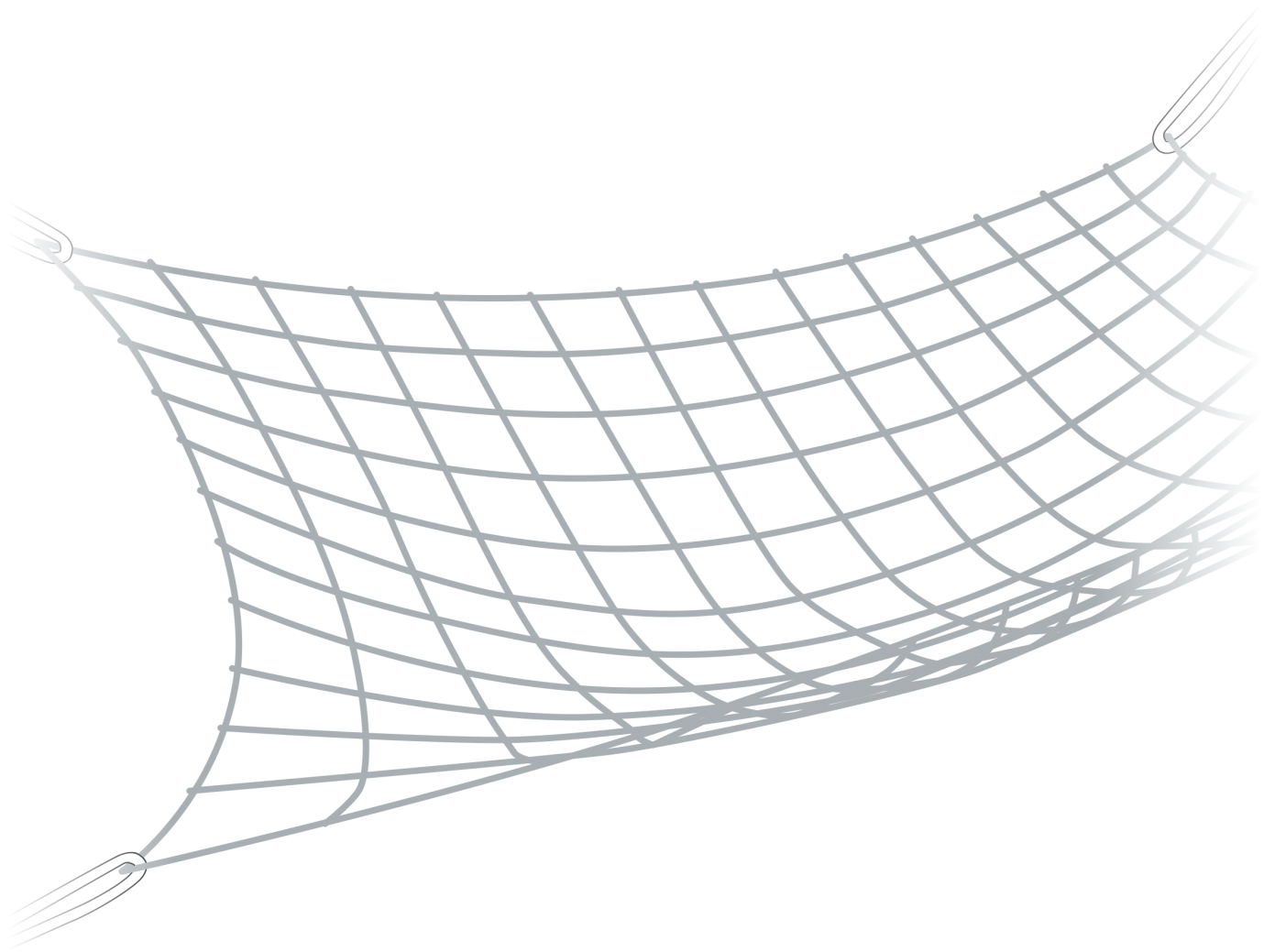

Kletternetz

Maximallast 200 kg

Damit's sicher ist!

HAIDIG OHG

🏠 Oberste-Wilms-Straße 23 – 44309 Dortmund


☎ +49 (0)231 91 28 156

📠 +49 (0)231 91 28 157

@ info@haidig.de

🌐 www.haidig.de

🛒 www.kindergartenbedarf-haidig.de

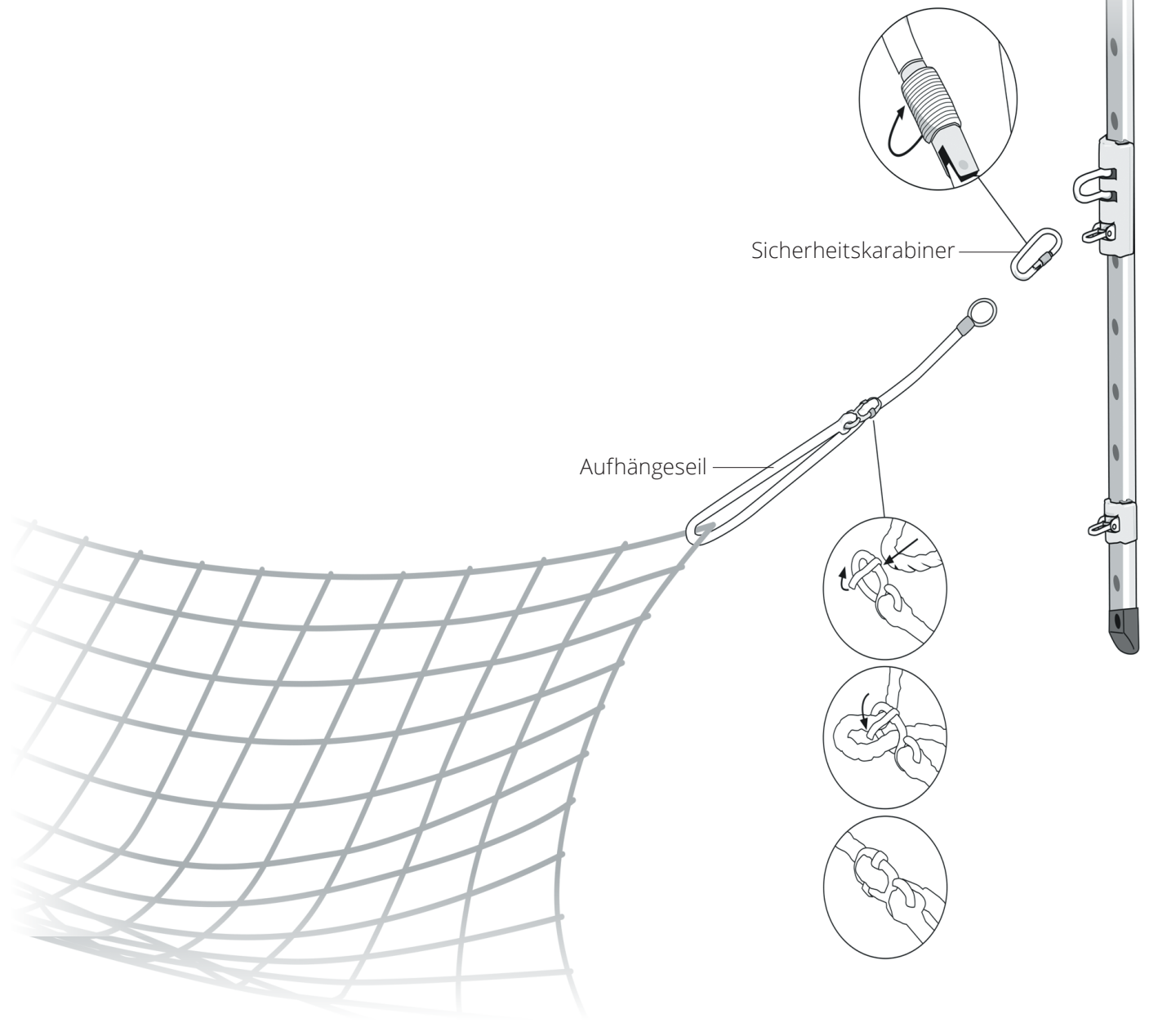

Sicherheitshinweis:

Achten Sie bitte auf eine fachgerechte Montage und verwenden hierfür nur Originalteile des Herstellers!
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mechanischen Teile auf ihre Festigkeit.

Herstellerinformation

Kletternetz

Hersteller:
HAIDIG® OHG
Amtsgericht Dortmund
HRA 16342

Artikelnummer: 112500

Sicherheitshinweise:

Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Fachpersonal einsetzbar.

Bitte angemessene Kleidung, wie Sportkleidung, Turnschuhe o. Ä. tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Armreifen, Ohrringe, Piercings o. Ä.) ablegen.

Maximallast	200 kg
Größe	ca. 300 x 250 cm
Eigengewicht	ca. 12,4 kg
Material	16 mm PP-Seil, Hanffarben, weichgeschlagen, Maschenweite 25 cm nach DIN 1175
Zubehör	inkl. 4 Aufhängeseile (je 1 – 2 m), mit Stellacht und 4 Sicherheitskarabiner

Einsatzmöglichkeiten:

In Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

Anwendungsmöglichkeiten:

Das Kletternetz kann an einem Wand- und / oder Deckenaufhängungssystem an **zwei, vier** oder **mehr** Punkten aufgehängt werden (empfohlen wird unser HAIDIG® T-Schienensystem).

Beurteilungskriterien:

- Förderung und Verbesserung der gesamten vestibulären Wahrnehmung
- Förderung der kinästhetischen / propriozeptiven Wahrnehmung (Stellungs-, Kraft- und Bewegungssinn)
- Förderung der Bewegungsplanung – der Körperkoordination
- Förderung der haptischen (taktilen) Wahrnehmung
- Aufbau des Muskeltonus / Muskelanspannung.


Pflege und Reinigung:

Das Produkt kann mit Wasser und einer Seifenlösung gereinigt werden.


Bitte vermeiden sie eine extreme, mechanische Reinigung, diese kann zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen. Desinfektion bitte ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol / Propanol). Die Verwendung anderer Substanzklassen können zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials führen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel! Netz ist nur in Turnschuhen oder Socken zu betreten.

Vor dem Zusammenfallen muss das Netz richtig trocken sein, sonst kommt es zur Stockfleck-Bildung.

Anwendungsbeispiele

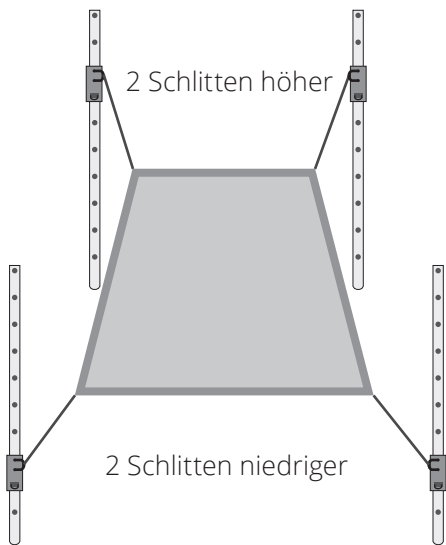

- 1. Mit der 4-Pkt.-Wandaufhängung**
· eine Veränderung des Neigungswinkels

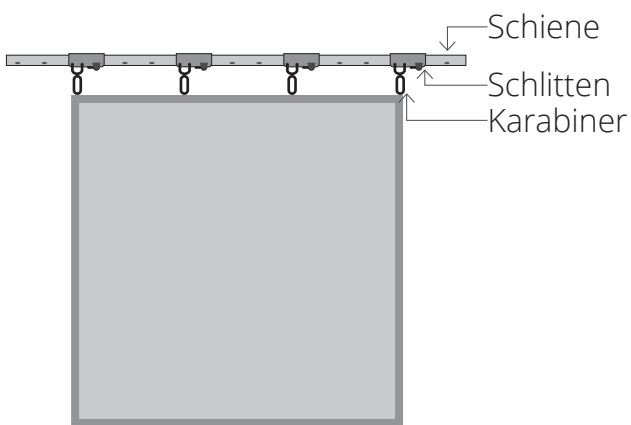

- 2. HAIDIG® Decken-T-Schienensystem**
· verschiedene Kletterwände schaffen

