

HAIDIG®

Kindergartenbedarf – Therapiebedarf – Befestigungslösungen



Rechteckschaukel

Maximallast 150 kg

Damit's sicher ist!

HAIDIG OHG

🏠 Oberste-Wilms-Straße 23 – 44309 Dortmund


☎ +49 (0)231 91 28 156

📠 +49 (0)231 91 28 157


@ info@haidig.de

🌐 www.haidig.de

🛒 www.kindergartenbedarf-haidig.de

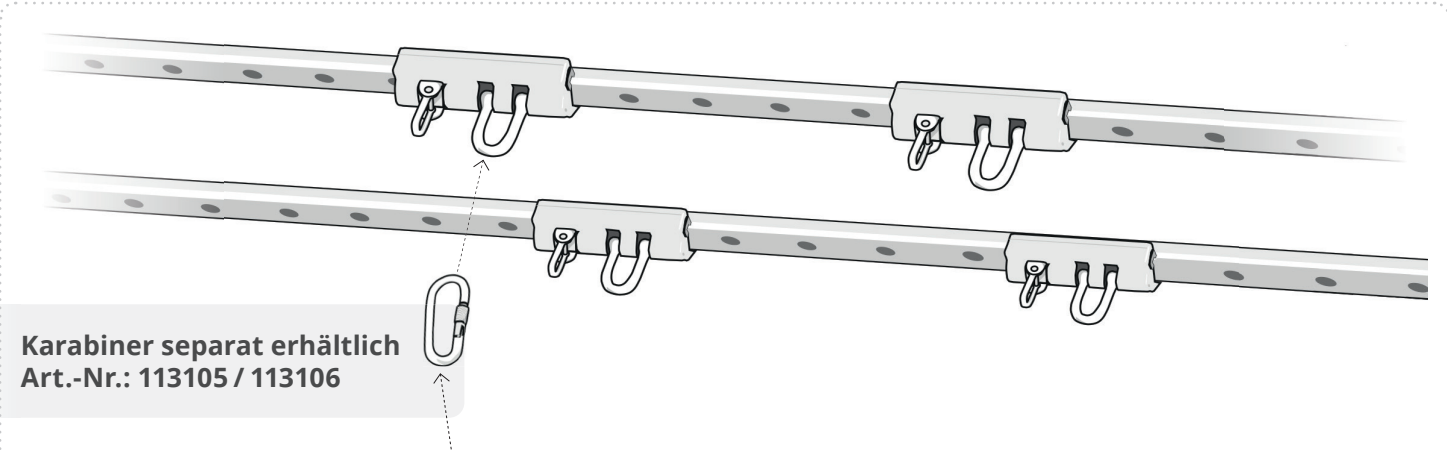

Karabiner separat erhältlich
Art.-Nr.: 113105 / 113106

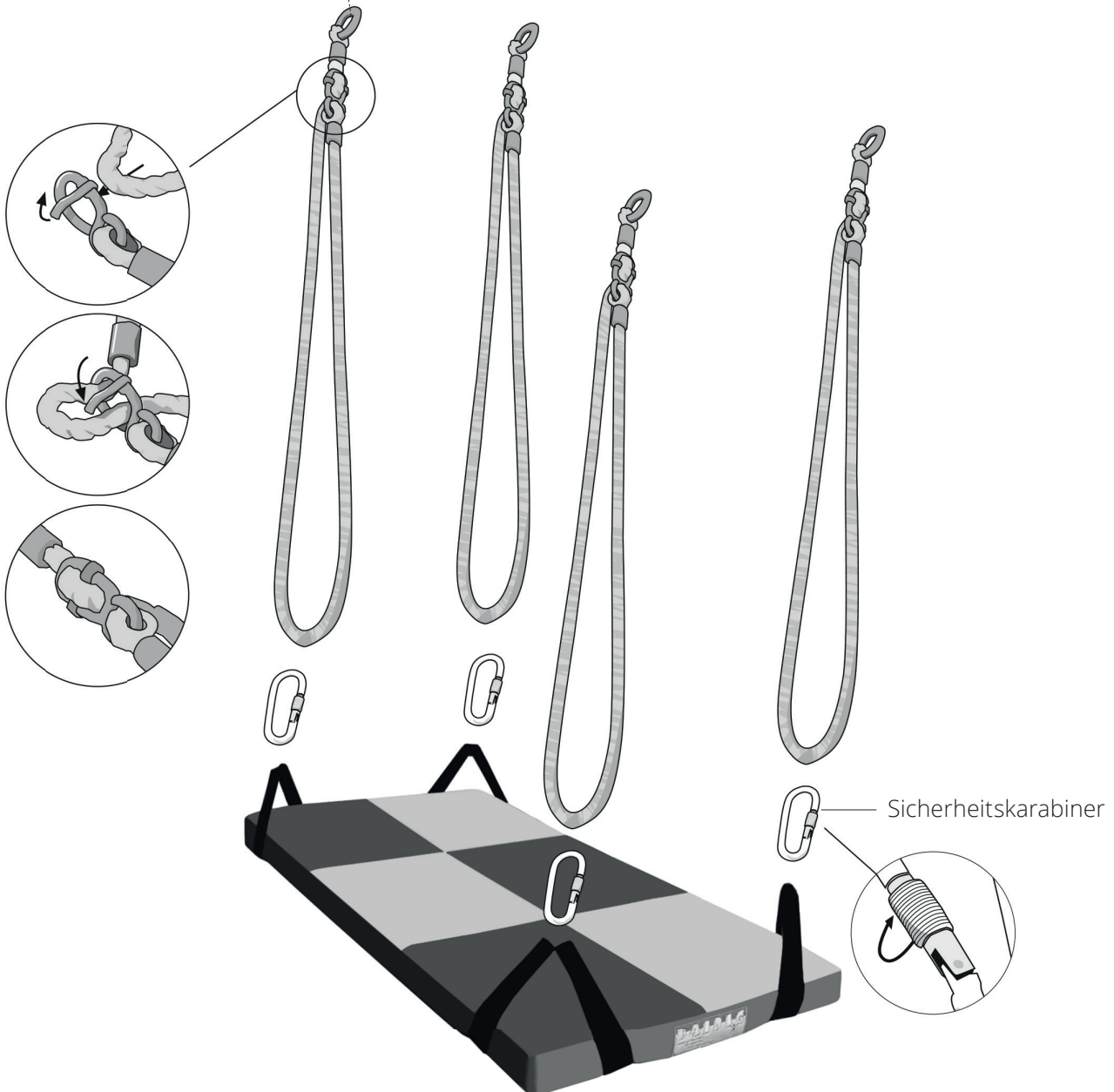

Sicherheitshinweis:

Achten Sie bitte auf eine fachgerechte Montage und verwenden hierfür nur Originalteile des Herstellers!
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mechanischen Teile auf ihre Festigkeit.

HerstellereinFORMATION

Rechteckschaukel

Hersteller:
HAIDIG® OHG
Amtsgericht Dortmund
HRA 16342

Artikelnummer: 117010

Sicherheitshinweise:

Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Fachpersonal einsetzbar.

Bitte angemessene Kleidung, wie Sportkleidung, Turnschuhe o. Ä. tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Armreifen, Ohrringe, Piercings o. Ä.) ablegen.

Maximallast	150 kg
Größe	ca. 60 x 120 cm
Eigengewicht	ca. 11 kg
Material	Cordura, Polypropylengurtband Multiplexplatte mit Schaumstoff gepolstert
Zubehör	inkl. 4 Aufhängeseile (je 2,5 m), höhenverstellbar und 4 Sicherheitskarabiner

Einsatzmöglichkeiten:

In Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

Anwendungsmöglichkeiten:

Die Rechteckschaukel kann an einem Deckenaufhängungssystem an **vier** oder **zwei** Punkten aufgehängt werden (empfohlen wird unser HAIDIG® T-Schienen-System).

Beurteilungskriterien:

- Unverzichtbar für z.B. Gleichgewichtsübungen, Tonusregulation, Arbeit mit Schwerkraft
- Aktivierung der Aufrichtereaktion
- Stimulation der extraokularen Muskulatur u.v.m.
- Einsetzbar in Ergotherapie und Psychomotorik
- Für die Behandlung von Kindern und Erwachsenen

Pflege und Reinigung:

Cordura ist ein robustes und unempfindliches Material. Trockener Schmutz lässt sich leicht herausbürsten. Bei stärkeren Verschmutzungen kann mit Wasser und einer Seifenlösung vorgereinigt werden. Bitte vermeiden Sie eine extreme, mechanische Reinigung, diese kann zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen. Desinfektion bitte ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol / Propanol). Die Verwendung anderer Substanzklassen können zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials führen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel!

Anwendungsbeispiele

1. HAIDIG® Decken-T-Schienensystem mit 4-Punkt-Aufhängung

Schiene ↗
Karabiner →

Aufhängeseile →

sitzend
(auch gegenüber
im Schneidersitz
möglich)



Unter Berücksichtigung der Maximallast, können auch mehrere Kinder die Schaukel gleichzeitig nutzen.



Bauchlage

Es können durch die große Plattform, unter Berücksichtigung der Maximallast, bis zu 3 Kinder in der Bauchlage schaukeln.

2. HAIDIG® Decken-T-Schienensystem mit 2-Punkt-Aufhängung



Rückenlage



Schaukel liegt an einer Seite auf und kann somit in einen Bewegungs-parcours integriert werden